





HIGHCLEAN
GROUP

Corona - Prävention

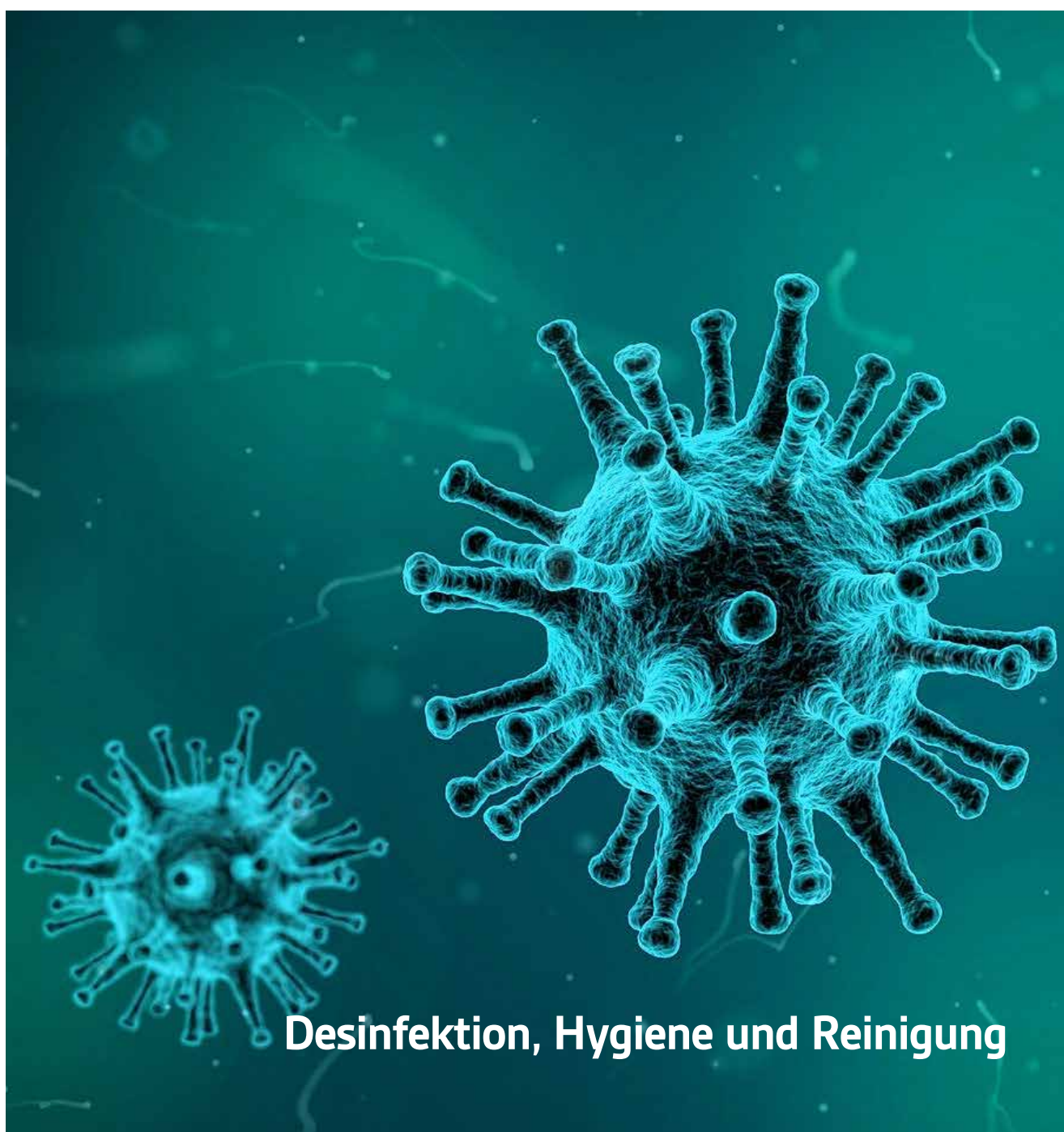

Desinfektion, Hygiene und Reinigung

gemeinsam. erfolgreich. handeln.

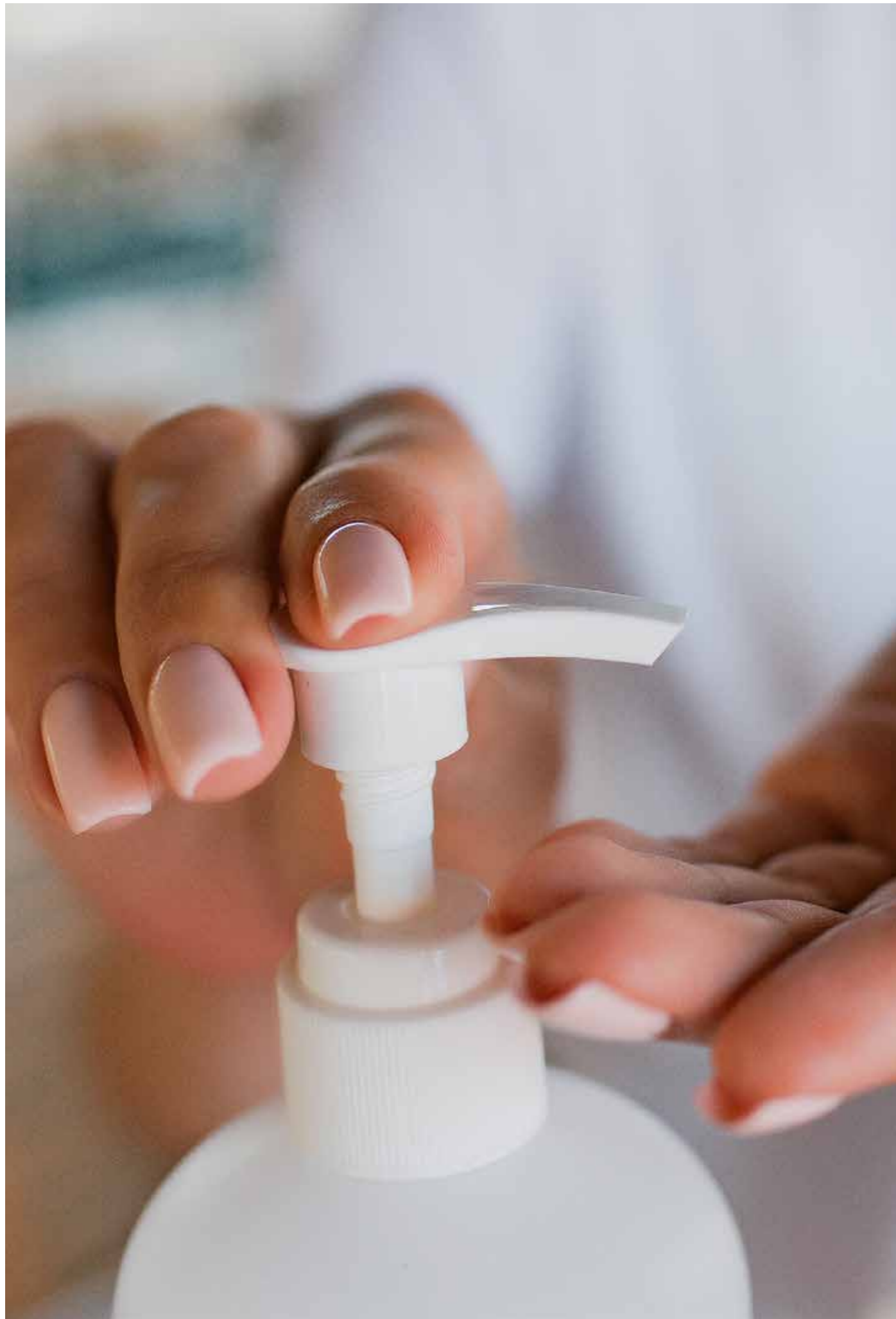

Inhalt

Häufige Fragen zu SARS-CoV-2	4
Hygienevorschriften sorgfältig beachten	5
Maske auf, aber welche?	6
Das ist beim Umgang mit Mund-Nasen-Masken zu beachten	7
Persönliche Schutzausrüstung	8
Händehygiene	9
Händedesinfektionsmittel	10
Infektionsgefahr durch Flächen ausschließen	11
Produkte zur Flächenhygiene	12 -15
AHA im Waschraum	16
Mit Sicherheit gegen Corona	17
SOS Start-Up Take Away	18
Folien	19

HÄUFIGE FRAGEN ZU SARS-COV-2

Wie wird SARS-CoV-2 am häufigsten übertragen?

Als Hauptübertragungsweg gilt die Tröpfcheninfektion. Dabei werden die Viren über Speicheltröpfchen übertragen. Aber auch aerogene Übertragungen über kleinste Luftpartikel sowie Ansteckungen über Hand- und Flächenkontakte sind möglich.

Warum soll man sich mit den Händen nicht ins Gesicht fassen?

Befinden sich Coronaviren auf den Händen, können die Erreger bei Berührung des Gesichts über die Schleimhäute der Nase, des Mundes und der Augen aufgenommen werden und zur Erkrankung führen.

Wie unterscheiden sich das Händewaschen und die Händedesinfektion in ihrer Wirkung?

Sowohl beim Waschen als auch bei der Desinfektion werden Krankheitserreger von den Händen entfernt. Doch die Händedesinfektion ist deutlich wirksamer. So werden bei der Desinfektion bis zu 100-mal mehr Keime inaktiviert als beim Händewaschen.

Was ist eine Infektionskette?

Die Infektionskette bezeichnet eine Reihe von Infektionen. Dabei erfolgt die Übertragung eines Krankheitserregers von einer Person auf andere

Personen, die den Erreger ebenfalls wieder weitergeben.

Warum ist es wichtig, einen Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern einzuhalten?

Beim Husten, Niesen oder Sprechen werden Tröpfchen mit hoher Geschwindigkeit in die Umgebung geschleudert. Tröpfchen, die größer als 5 Mikrometer sind, sinken in der Luft innerhalb eines Meters rasch auf den Boden. Um eine Ansteckung über solche herumgewirbelten Tröpfchen zu vermeiden, ist der Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern einzuhalten.


Wie wichtig ist regelmäßiges Lüften?

Winzige, in Schwebestoffen enthaltene Viruspartikel, die kleiner als 5 Mikrometer sind, können über mehrere Stunden in der Luft verbleiben. Über den Luftweg (aerogen) können diese erregerrhaltigen Schwebestoffe eingeatmet werden. Deswegen ist es wichtig, durch regelmäßiges Lüften die Innenraumluft auszutauschen.

HYGIENEVORSCHRIFTEN SORGFÄLTIG BEACHTEN



Maske tragen!

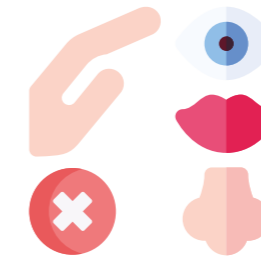

Nicht ins Gesicht fassen!




Hände waschen!



Hände desinfizieren!



Niesetikette beachten!

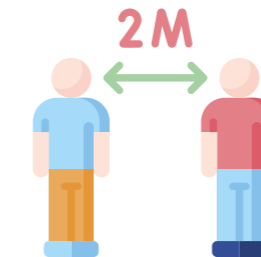

1,5 - 2 Meter Abstand halten!



Lüften!



Kein Händeschütteln!

Übertragungsrisiken reduzieren

Für den Schutz vor SARS-CoV-2 sollte man erweiterte Infektionsschutz- und Hygienevorschriften berücksichtigen. Mit den Maßnahmen soll verhindert werden, dass Coronaviren im Allgemeinen übertragen und weiterverbreitet werden.

In bestimmten Situationen, ist die Einhaltung eines Mindestabstands schwer umzusetzen. Doch wann immer es möglich ist, sollte ein ausreichender Mindestabstand von 1,5 - 2 Metern eingehalten werden. Das gilt insbesondere bei großen Gruppen, für Besprechungen und Konferenzen.

Zu Hause bleiben bei Krankheitsanzeichen

wie z. B. Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks- /Geruchssinns, Hals- und Gliederschmerzen.

Maßnahmen bei akuter Erkrankung

Bei akuter Erkrankung Mund-Nasen-Schutz anlegen und sich isolieren.

MASKE AUF, ABER WELCHE?

Mit dem Corona-Virus kam die Mund-Nasen-Bedeckung als Alltagsbegleiter.

Nur welche Mund-Nasen-Bedeckung ist die richtige für welchen Zweck? Wir erklären Ihnen in unserem Überblick die Unterschiede, Wirkungsweisen und Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Modelle.

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an persönlicher Schutzausrüstung für Ihre Gesundheit und für Ihr Unternehmen.



Alltagsmasken

Keine Medizinprodukte
Mehrwegmasken aus Stoff –
waschbar und wiederverwendbar



MNS-Masken

Zertifizierte Medizinprodukte
Einwegmasken – spätestens nach
8 Stunden Tragedauer zu
entsorgen



FFP Masken

Zertifizierte Atemschutzmasken
Filterklassen FFP1, FFP2, FFP3
mit Kennzeichnung „NR“ nicht
wiederverwendbar, mit „R“
wiederverwendbar

Alltagsmasken

Alltagsmasken, auch: Community-Masken oder Behelfsmasken, bieten einen gewissen Schutz vor einer direkten Übertragung des Corona-Virus durch Tröpfcheninfektion, solange sie nicht durchfeuchtet sind. Wenn Sie eine Alltagsmaske tragen, schützen Sie zwar nicht sich selbst, aber andere. Allerdings ist eine gewerbliche Nutzung der Masken nicht zulässig, da entsprechende Regularien fehlen; auch sind sie kein Medizinprodukt. Es gibt sie in der Einweg- oder Mehrweg-Variante

MNS-Masken

Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS), auch: OP-Maske, ist ein zertifiziertes medizinisches Produkt. Auch hier werden vor allem andere vor einer Ansteckung mit Covid-19 geschützt, nicht der Träger selbst. MNS-Masken sind Einwegmasken, d. h. sie müssen spätestens nach 8 Stunden Tragedauer entsorgt werden. Beim Anlegen der Maske ist es wichtig, auf Außen- und Innenseite zu achten. Außerdem sollte die Maske bis über das Kinn gehen. Und auch hier gilt: Sobald die Maske feucht geworden ist, weg damit.

FFP Masken

FFP-Masken (FFP = Filtering Face Pieces) sind nach europäischen Normen zertifizierte Atemschutzmasken. Es gibt sie in den Filterklassen FFP1, FFP2 und FFP3, wobei FFP2- und FFP3-Masken im Gegensatz zu MNS besonders nah anliegen und aufgrund ihrer sehr guten Filterleistung v. a. für den medizinischen Bereich empfohlen werden und sowohl den Träger, als auch andere schützen. Die Masken sollten nicht wiederverwendet werden, außer sie tragen die Kennzeichnung „R“ für „reusable“. Masken mit der Kennzeichnung KN95 bzw. N95 sind das chinesische bzw. amerikanische Äquivalent zu europäischen FFP-Masken.

DAS IST BEIM UMGANG MIT MUND-NASEN-MASKEN ZU BEACHTEN

- **Vor dem Anlegen die Hände gründlich waschen/ desinfizieren**
- **Innenseite der Mund-Nasen-Maske nicht anfassen**
- **Mund-Nasen-Maske möglichst eng über Mund, Nase und Kinn anlegen, sodass an den Seiten keine Lücken bleiben**
- **Während des Tragens die Mund-Nasen-Maske nicht anfassen**
- **Durchfeuchtete Mund-Nasen-Maske umgehend abnehmen und Austauschen**
- **Mehrfach verwendbare Mund-Nasen-Maske nach Gebrauch bis zum Waschen luftdicht, z. B. in einem Gefrierbeutel, aufbewahren**
- **Nach der Abnahme die Hände waschen/desinfizieren. Durchfeuchtete Mund-Nasen-Maske entsorgen bzw. aufbereiten**
- **Aufbereitung mehrfach benutzbarer Mund-Nasen-Masken:**
 - **Täglich in der Waschmaschine bei 60° bis 95° C (Waschmittel mit Bleiche) waschen**
 - **Alternativ: 10 Min. in geschlossenem Kochtopf auskochen**
 - **Mehrfach benutzbare Mund-Nasen-Maske nach dem Waschen auf Stufe 2 bügeln**



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Worauf es ankommt: Was, wann und wie schützt man sich?

Nosokomiale Infektionen und Infektionen des pflegerischen und ärztlichen Personals mit SARS-CoV-2 stellen ein ernstzunehmendes Risiko für Kliniken dar. Im Umgang mit Verdachtsfällen bzw. mit bestätigten COVID-19-Patienten sieht das Robert Koch Institut das Tragen der kompletten „Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)“ vor. **Diese besteht aus:**

- **Schutzkittel**
- **Einweghandschuhen**
- **Mindestens dicht anliegendem Mund-Nasen-Schutz bzw. Atemschutzmaske und Schutzbrille**
- **Bei der direkten Versorgung von Patienten mit bestätigter oder wahrscheinlicher COVID-19-Infektion: mindestens FFP2-Maske**



Mund-Nasen-Schutz

Maske zum Schutz vor Tröpfchen und Flüssigkeiten, hoher Tragekomfort, geringer Atemwiderstand 3-lagig, mit Ohrengummi u. Nasenbügel, latex- und nickelfrei, zertifizierter Artikel, gegen Tröpfcheninfektion, für medizinisches Personal empfohlen

Weitere Modelle stehen zur Verfügung.

Art.-Nr.: 190



Handschuhe

Handschuhe für das Gesundheitswesen, sowie Routinearbeiten in Krankenhäusern und Kliniken, Kommunale Einrichtungen (Reinigungsdienste) und geeignet für den Umgang mit Haushaltsreinigern.

Weitere Modelle stehen zur Verfügung.

Art.-Nr.: 191



Schutzbrillen

Schutzbrille mit Anti-Kratz- u. Anti-Beschlag-Beschichtung, sehr bruchfest, mit Komfortnasensteg

Art.-Nr.: 192



Schutzkittel

Für die Hygieneprevention im Pflegebereich und für Besucher

Art.-Nr.: 193


HÄNDEHYGIENE

Hände gründlich reinigen

Als Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 gilt derzeit die Tröpfcheninfektion. Eine Übertragung des Erregers kann aber auch indirekt über die Hände erfolgen. Deswegen ist es wichtig, auf eine regelmäßige Händehygiene zu achten.

Hände wirksam desinfizieren

Falls das Händewaschen in bestimmten Situationen nicht möglich ist, sollten die Hände desinfiziert werden.

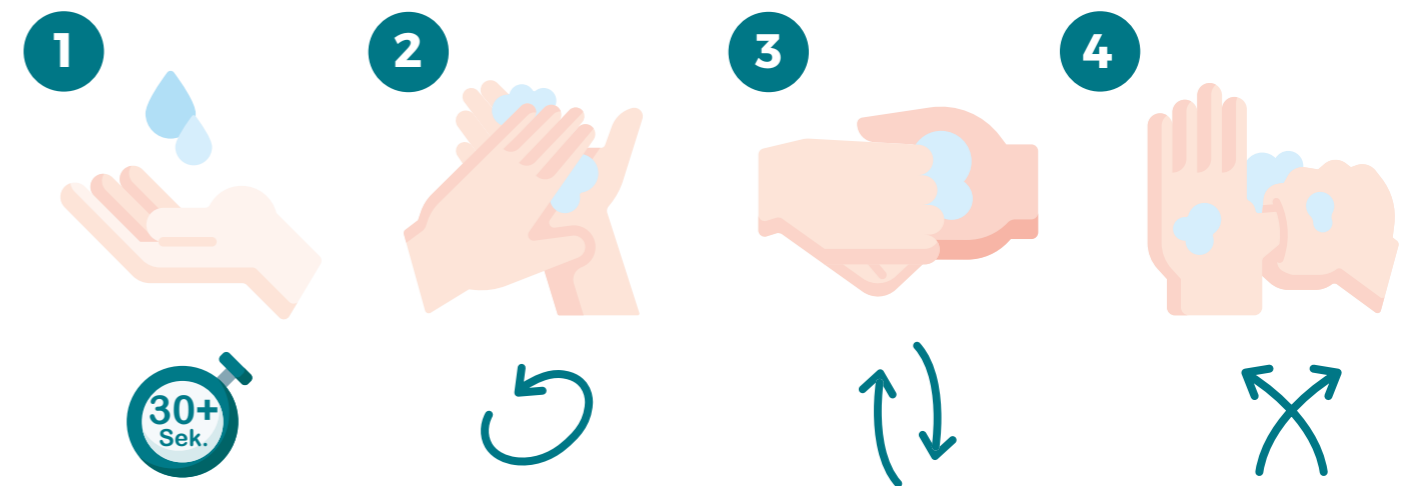

In folgenden Situationen sollten die Hände desinfiziert werden:

- Wenn das Händewaschen nicht möglich ist
- Nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, wie Fäkalien, Blut oder Erbrochenem
- Vor Anlegen und nach Ablegen des Mund-Nasen-Schutzes
- Nach Ablegen von Einmalhandschuhen
- Bei Bedarf

So sollten die Hände desinfiziert werden:

- Hohle Hand mit einem mindestens begrenzt viruzid wirksamen Händedesinfektionsmittel (s. Etikett des Produkts) füllen
- Alle Bereiche der Hände sorgfältig über 30s (s. Etikett des Produkts) lang einreiben: wichtige Kontaktstellen wie Daumen, Fingerspitzen und Nagelfalz besonders berücksichtigen
- Hände müssen während des Einreibens feucht gehalten werden

Wichtig: Vermehrtes Händewaschen und Desinfizieren kann die Haut austrocknen. Deswegen sollten die Hände regelmäßig mit einer Hautpflegelotion eingecremt werden.

HÄNDE- DESINFEKTIONSMITTEL

Qualität und Verträglichkeit unverzichtbar.

Durch die Händedesinfektion werden bis zu 100-mal mehr Keime auf den Händen inaktiviert als beim Händewaschen. Auf dem Etikett des Händedesinfektionsmittels sollte vermerkt sein, dass es begrenzt viruzid wirksam ist. Damit ist sichergestellt, dass das Mittel gegen behüllte Viren, wie SARS-CoV-2, wirkt.

Händedesinfektionsmittel mit den noch umfassenderen Wirkspektren begrenzt „viruzid PLUS“ und „viruzid“ können in der Corona-Zeit ebenfalls verwendet werden.

PRODUKTE ZUR HÄNDEHYGIENE



Manueller Kunststoffspender zur Wandmontage

Desinfektionsspender für Euroflaschen 500ml und 1000ml oder Nachfüllware.

Art.-Nr.: 200



Flaschen & Kanister

Parfümfreie, besonders hautpflegende Hände- und Hautdesinfektionsprodukte. Produkte sind vollumfänglich begutachtet.

Art.-Nr.: 210



Automatik Spender zur Wandmontage

Berührungslose Automatic Desinfektionsspender für Euroflaschen 500ml und 1000ml oder Nachfüllware.

Art.-Nr.: 201




150 ml

100 ml

Kittelflaschen und für Unterwegs

150ml Fläschchen Flüssig mit Sicherheitsverschluss
100ml Gel Hautdesinfektion

Art.-Nr.: 211

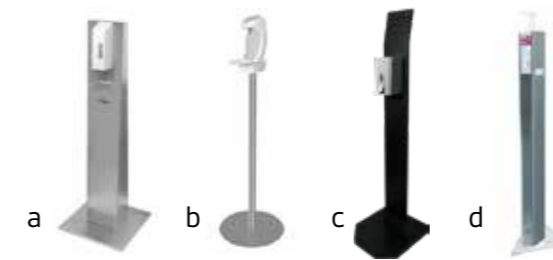

Mobile Standsäule für Dosierspender

Schnelle und einfache Spendermontage
Mit handelsüblichem Spender kombinierbar
Praxis- und anwenderorientierte Lösung für variable Platzierung

Weitere Modelle stehen zur Verfügung

Art.-Nr.: 212

INFEKTIONSGEFAHR DURCH FLÄCHEN AUSSCHLIESSEN

Studien zeigen:

SARS-CoV-2 kann auf Oberflächen von vier Stunden bis zu neun Tagen infektiös bleiben. Sind Flächen beispielsweise mit erregerrhaltigem Speichel kontaminiert, können die Viren bei Handkontakten mit dem Gesicht in die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen gelangen und eine Infektion auslösen.

Folgende häufig berührte Flächen sollten mehrmals täglich gereinigt werden:

- Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen und Fenstern) sowie der Umgriff der Türen
- Treppen- und Handläufe, Lichtschalter, Tische, Telefone, Computertastaturen
- Fahrstuhl-tasten
- Alle weiteren Griffbereiche

Folgende Flächen sollten desinfiziert werden:

- Alle Flächen direkt nach Kontamination mit Blut, Ausscheidungen oder Erbrochenem
- Händedesinfektionsmittel-Spender vor Austausch des Inhalts
- Spenderhebel von Händedesinfektionsmittel-Spendern mehrmals täglich

Ist eine Flächendesinfektion notwendig, so sollte diese generell als Wischdesinfektion mit einem nachweislich wirksamen Flächendesinfektionsmittel durchgeführt werden. Nach Auftrocknung können die Flächen wieder benutzt werden.

Flächen im Sanitärbereich, wie Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden, sind täglich zu reinigen.

PRODUKTE ZUR FLÄCHENHYGIENE

Flächenreinigungsgeräte:



Profi Wash Compact Reinigungsgewagen

Der Spezielle Profi Wash Compact Reinigungsgewagen bietet dem Anwender die Möglichkeit flexibel, schnell und platzsparend das benötigte Bedarfsequipment für die erforderliche Großflächenreinigung zu transportieren und umzusetzen.

System PreWash - Einsatz über 10L Box / Somit sind Ihre Textilien sofort einsatzbereit.

System Toolbox - Zugriff auf alle Tools und Schutz vor unerlaubtem Zugriff durch Dritte

Art.-Nr.: 220



Vermop Sprint V, 40 Bodenwischsystem

Klapphalter, 40cm
Sehr gute Reinigungsleistung. Die Auflagefläche des Halters ist optimiert für ein gleichmäßiges Wischbild und eine effektive Schmutzentfernung.

Art.-Nr.: 222



Vermop Scandic X Padhalter

25 x 9 cm
Der Vermop Scandic Mono Klettmophalter wird einseitig bespannt. Die Haltergröße von 25 cm ist ideal für kleine Flächen und Räume mit viel Interieur. Der Vermop Scandic Mono Halter kann mit verschiedenen Bezügen für die Nass-, Feucht-, und Trockenreinigung kombiniert werden.

Art.-Nr.: 223



Vermop Scandic X-Telestiel3

3-fach Teleskop, 80-171 cm
Ergonomisch verstellbare Arbeitshöhe
Der Scandic X Teleskopstiel übernimmt mit Leichtigkeit und vorbildlicher Ergonomie alle Aufgaben. Reinigungskräfte können den Stiel je nach gewünschter Arbeitshöhe (80cm Länge für die Spiegelreinigung bis 171cm für Obenarbeiten) mit einem Klick einstellen – ohne lästiges Verdrehen. Die angebrachten Geräte gleiten über Böden, entfernen Staub von Oberflächen oder reinigen mühelos Decken.

Art.-Nr.: 221



Möppe für Padhalter oder Bodenwischsystem

Einsatzgebiete:

- Feucht- und Nassreinigung
- Sehr gut geeignet für polierte Steinbeläge und glasierte Fliesen
- Gut geeignet für mikroporöse Beläge und strukturierte Böden
- Gut geeignet für die Unterhaltsreinigung
- Gute Schmutzanlösung
- Gute Wasseraufnahme
- Anwendungssicherheit durch Farbkodierung (weiß, blau, rot)
- Hochwertig verarbeitete Taschen mit Schlauchgummiprofil

Art.-Nr.: 224a, 224b



Mikrofaser Hochleistungstücher

- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Geringere Langzeitkosten gegenüber einer Standard-Mikrofaser
- Maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser
- Silikonfrei
- Waschmaschinenfest bis 95
- Trockner geeignet

Art.-Nr.: 225



NINJA Sprühgerät

Elektrisch betriebene Sprühlanze zum Versprühen und Vernebeln von Desinfektions- und Reinigungsmitteln, Pflanzenschutz- oder Entmoosungsmitteln, Flüssigdüngung etc. Set wahlweise mit 1 oder 2 Akkus.

Der elektrische Sprüher benötigt keine externe Elektrizität und keinen Luftdruck. Lediglich ein zusätzlicher Behälter mit Flüssigkeit wird benötigt. Der Verlängerungsschlauch wird einfach in den Behälter getaucht und mit dem NINJA verbunden. So kann bis zu 10 m hoch und weit gesprüht werden. Ladedauer 1 h, Durchfluss regelbar: 0,85 l/min bis 1,7 l/min Druck: max. 7 bar, Akku: 14,4 V, 2,2 Ah, für pH-Wert 4-10 Alles ist praktisch in einem Koffer (59x25,5x9 cm) verpackt mit zusätzlichem Ansaugrohr, Verlängerungsschlauch PVC 9 m 3 Sprühköpfen (Nebel, Flachstrahl, Vollstrahl), Ladegerät Karabinerhaken, Verlängerungslanze 1 m, Li-Ion Akku bis 2 h mit CE-Markierung und nach europäischen Richtlinien genormt.

Art.-Nr.: 231



Vliesreinigungstücher - In weiß oder blau

Anwendungsbereiche:

Labor, Werkstatt, Automobile, Pflege, Industrie, Reinigung, Pharma, Kosmetik u.s.w.

- Hygienisch
- Fusselfrei
- Kratzfrei
- Nass und trocken verwendbar
- Sehr stark
- Ohne Bindemittel
- Neue Fasern
- Gute Absorptionkapazität
- Silikonfrei

Art.-Nr.: 230

PRODUKTE ZUR FLÄCHENHYGIENE



5 Liter
1 Liter
0,5 Liter

Flächendesinfektion

Geeignete Desinfektionslösung in 5 Liter Kanister für NINJA Sprühgerät.

Alkoholfreies, gebrauchsfertiges Präparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für alkoholempfindliche Medizinprodukte und Flächen geeignet.

Art.-Nr.: 232

Fragen Sie bei uns nach, wir beraten Sie gerne!



Drucksprüher

Black solvent sprayer“ 1,5 ltr
Blue solvent „360° Universal“ 1,5 ltr

Der Solvent Sprayer ist speziell für die Verneblung von Mitteln entwickelt. Der Pumpenkörper ist aus lösemittelresistentem Polyamid gefertigt. Für alle Anwendungen in Spray-Reinigung und Vorbehandlung, Bodenpflege, Teppich- und Polsterreinigung, Fleckenentfernung, Mobiliar und Pflanzenpflege, Moosbeseitigung aber auch für Fahrzeug-Innenpflege.

Art.-Nr.: 233

Flächendesinfektion vorgetränkte Tücher für den schnellen und mobilen Einsatzbedarf:



Alkoholfreie Desinfektionstücher

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher zur routinemäßigen Desinfektion
VAH- / RKI- / IHO- gelistet

100 Tücher 20 x 22 cm

Art.-Nr.: 235



Vliestuchrollen im Mehrwegspendereimer zum selbst befüllen

Vliestuchspender, rund weißer Mehrweg-Spendereimer mit Entnahmedeckel.

5 Liter Eimer für Vliestücher

Art.-Nr.: 236



Handsprühflaschen

Aus robusten, reinigungs- und desinfektionsbeständigen Materialien. Ergonomisch und leicht in der Handhabung. Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft. Kann bequem mit drei Fingern bedient werden. Vielfach höhere Lebensdauer. Für unterschiedliche Einsatzgebiete verwendbar.

Weitere Modelle stehen zur Verfügung

Art.-Nr.: 234



Alkoholische Desinfektionstücher

Alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur viruziden Desinfektion in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung.
VAH- / RKI- / IHO- gelistet

100 Tücher 20 x 22 cm

Art.-Nr.: 235s



Vliestuchrollen für Spendereimer

Festes, hygienisches, fusselfreies Vliestuch, lebensmittelgeeignet

Folienpack mit 6 Rollen à 250 Blatt (30 x 15 cm)

Art.-Nr.: 237



Allzweckreiniger

Alle Großobjekte, bei denen es auf Hygiene und Sauberkeit ankommt. Gut geeignet für Türen, Glas und Kunststoff-Flächen, Kacheln, lackierte Holz- und Metallmöbel, Fliesen, Marmor und PVC. Auch abwaschbare Oberflächen wie Kunststoff, lackierte Türen, Keramik und Metall werden streifenfrei gereinigt. Nachspülen oder Nachwischen nicht erforderlich.

Art.-Nr.: 240



Sanitärreiniger Konzentrat

Säure- und chlorfreies Sanitärreiniger-Konzentrat zur Anwendung auf allen Oberflächen im Sanitärbereich. Löst täglich anfallende Kalk- und Kalkseifenrückstände wie auch ölige und fettige Verschmutzungen.

Art.-Nr.: 242



Saurer Desinfektionsreiniger

Saure Flächendesinfektion für den Sanitärbereich. Neuartige aldehyd- und phenolfreie Wirkstoff-Formulierung. Verfügt über ein breites Wirkungsspektrum gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze und Viren, einschl. HBV- und HIV-Viren, BVDV(HCV)-, Vaccinia- und Noroviren, MRSA-wirksam.

Art.-Nr.: 244



Säurefreier Desinfektionsreiniger

Flüssiger säurefreier Desinfektionsreiniger für den Sanitärbereich, VAH-, IHO- und RK-gelistet, Geprüft nach EN 1276, EN 1650 und EN 13697. Geprüft nach der DVV/RKI-Leitlinie. Enthält weder Säure noch Chlor, materialschonend, äußerst wirtschaftlich durch exakte Dosierung.

Art.-Nr.: 241



Aldehydfreier Desinfektionsreiniger

Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen. Das Produkt ist bei der Verarbeitung geruchsneutral, reinigungsaktiv und trocknet schlierenfrei auf. Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien, Hefen, Salmonellen, Listerien und behüllte Viren (begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV). Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor.

Art.-Nr.: 243

AHA IM WASCHRAUM

Auch im Waschraum gelten die wissenschaftlich anerkannten AHA Regeln – Abstand halten, Hygiene beachten, Maske tragen.

Hier unterstützen wir Sie mit unseren Produkten der Reinigung und Desinfektion für Benutzer und Einrichtung, denn wie Sie wissen, ist die Übertragung der Viren und Bakterien über die Hände die zweithäufigste Infektionsquelle.

Somit steht die Handhygiene an erster Stelle. Hierzu eignen sich insbesondere unsere sensorgesteuerten Seifenspender.

Darüber hinaus beraten wir Sie sehr gerne und erstellen für Sie Ihr maßgeschneidertes Hygienekonzept, nicht nur für den Waschraum.

PRODUKTE ZUR WASCHRAUMHYGIENE



Sensorspender

Bis zu 2.500 Dosierungen, abschließbar.
Geschlossenes System: hygienisch, schnelle und einfache Wiederbefüllung

Art.-Nr.: 245

Kontakt mit häufig genutzten Flächen minimieren:

Der Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfen sollte möglichst minimiert werden. Es empfiehlt sich, diese Flächen nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anzufassen, sondern ggf. den Ellenbogen benutzen.

MIT SICHERHEIT GEGEN CORONA

Da ein stetiges Erinnern eine schnelle Verhaltensänderung fördert, bieten wir Ihnen Produkte mit nachhaltiger „pädagogischer“ Wirkung, zur Erfüllung dieses Ziels, an.

Gute Erfahrungen haben unsere Kunden bisher mit unseren hinweisenden Bodenmatten und Abstandsschildern gemacht.

PRODUKTE ZUM SICHERHEITSBEDARF



Bodenmatte „Abstand halten“.

Quadratisch betongrau Maße: 1,50 x 1,50 m
Rechteckig betongrau Maße: 1,50 x 0,75 m
Technische Daten:
Brandverhalten BFL-S1 // B1 schwer entflammbar
CE 2714127 / BOD-14-4-17-01
Rutschhemmung DS > = 0,30 (Trockenzustand)
R10 > 10° – 19° (Nasszustand)
Materialstärke 2 mm
Nachhaltigkeit wiederverwendbar, 100 % recyclebar
Verlegung Fixierung doppelseitiges Klebeband/
Gewebeband
Reinigung feucht wischen

Art.-Nr.: 250a Maße: 1,50 x 1,50 m
Art.-Nr.: 250b Maße: 1,50 x 0,75 m




1,5m Abstandsschild

Das 1,5m Abstands-Bodenschild kann bei verschiedenen Gelegenheiten verwendet werden, z.B. bei Fußböden, Türen, Gehwegen, Plätzen, egal ob im Innen- oder Außenbereich.

+ hochwertigem, stabilem PE-Kunststoff
+ UV- und Frostbeständig

Art.-Nr.: 251

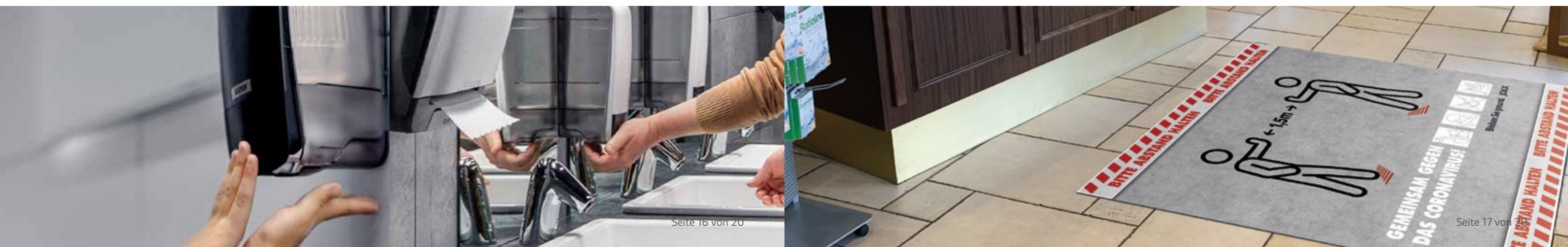

TAKE AWAY



Bagasse Menüboxen

Für heiße & gekühlte Speisen, praktischer anhängender Klappdeckel, viele Größen und Fachgrößen (1-, 2- oder 3-geteilt).

Art.-Nr.: 260



Bagasse Schalen & Holz-Bestecksets

Für heiße & gekühlte Speisen, perfekt für Salat, viele Größen und sicher schließende rPET- oder Bagasse-Deckel.

Art.-Nr.: 262



Octabagasse

Ideal für alle heißen und gekühlten Speisen, in vielen Größen, perfekt schließende rPET- oder Bagasse-Deckel.

Art.-Nr.: 261



Suppenbecher

Geeignet für heiße & gekühlte flüssige Speisen, in unterschiedlichen Größen, sicher schließende Deckel mit Entlüftungslöchern.

Art.-Nr.: 263



FOLIEN, DIE IHR GESCHÄFT UNTERSTÜTZEN

Wenn Ihre Speisen köstlich aussehen, zu Impulskäufen anregen sollen und Sie eine auslaufsichere Verpackung gewährleisten möchten, sind Duniform®-Folien genau das Richtige. Wählen Sie zwischen PP-, PET- und Universalfolien. Sie sind kristallklar und können in spezieller Ausführung Beschlagen vermeiden. Zudem können wir sie mit Logo-Druck versehen und so Ihre Verpackung zu einem starken Werbemittel für Ihr Unternehmen machen.

Das "One-Stop-Shop" Duniform® Konzept kombiniert Siegelmaschinen, Schalen, Siegelfolien, Transportlösungen sowie Service und Support. Sie wählen einfach die Lösung, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.




Gewinnen Sie umweltbewusste Kunden durch umweltfreundliche Verpackungen.



Holen Sie sich eine hochwertige Versiegelungsmaschine, die Ihren Bedürfnissen entspricht, egal, ob Sie ein lokales Feinkostgeschäft oder eine industrielle Großküche haben.



Wählen Sie eine Schale für gefrorene, gekühlte oder warme Speisen aus einer breiten Auswahl an Formaten und hochwertigen Materialien.

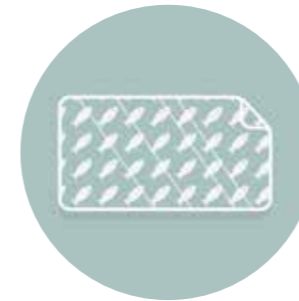

Lassen Sie Ihre Folien mit Logo-Druck versehen, um sich abzuheben und Ihre Verpackung zu einem Werbemittel zu machen.



Präsentieren Sie Ihre Speisen bestmöglich und gewährleisten Sie eine auslaufsichere Verpackung mit kristallklaren Folien.



Verlängern Sie die Haltbarkeit Ihrer Speisen, erleichtern Sie Ihre Planung und minimieren Sie Lebensmittelverschwendung.



Erhalten Sie während der gesamten Lebensdauer Ihrer Lösung engagierten lokalen Support, der technischen Service, fachkundige Beratung und auch Schulungen umfasst.



Sorgen Sie mit Thermo-Taschen und -boxen, Temperaturkontrollgeräten und Trolleys dafür, dass Ihre Speisen in einem Top-Zustand ankommen.

Art.-Nr.: 264

Die Fachhandelsgruppe
für Hygiene, Reinigung
und Pflege.

**Ihr Partner
in der Nähe!**



CBS City-Wissraum Betriebshygiene
Service und Vertrieb GmbH



FADAM
Hygiene Vertriebs GmbH

Fetter + Spiritini
REINIGUNGSMITTEL & GASTRO-SERVICE

fincke^{fi}
bringt die Hygiene.

FREUCO
Saubere Leistung!



HAGER
sicher, sauber, nachhaltig.

HK HASENKAMPF
OVERALL PRODUKT - UNIVERSALZWECK



LAYER-CHEMIE
Ihr Hygienepartner



LOCHNER
HYGIENE



PRODINGER
Hygiene

HAGER
Mit Sicherheit sauber

Rohde Clean

Ranft
Systeme für saubere Lösungen

Schlund & Ruppert
HYGIENE - REINIGUNGSBEDARF

Die zur HIGHCLEAN GROUP gehörenden Partnerunternehmen unterstützen Sie an zahlreichen Standorten mit hoher Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung in der Reinigungs- und Hygienebranche. Ihr Vorteil: Schnelle und flächendeckende Verfügbarkeit, höchste Qualitäts- und Produktstandards, breite Sortimentsvielfalt mit starken Hersteller- und Eigenmarken zu fairen Preisen.



HIGHCLEAN GROUP eG

Opitzstraße 12 • 40470 Düsseldorf • Tel.: 0211 239 565 0
info@highclean-group.de • www.highclean-group.de

